




### 3. Інструкція з накладання

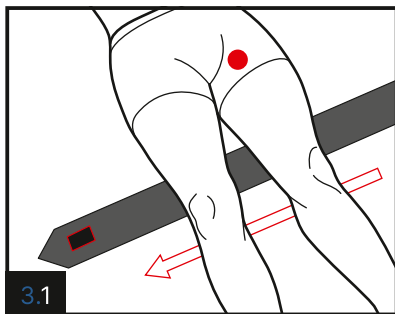


3.1  
Зі сторони поранення протягнути під колінами кінець ременю з біркою розміщення турнікета до гори.

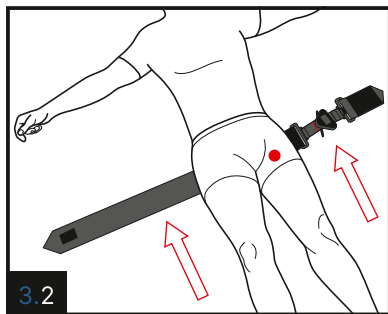


3.2  
Ковзаючими рухами перемістити ремінь під сідниці пораненого.

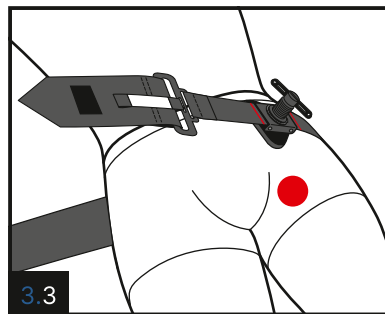


3.3  
Розмістити тиснучу подушку в місце накладання. Корекція положення подушки відбувається переміщенням механізму в межах червоних ліній на ремені, або переміщенням основного ременю під сідницями пораненого.

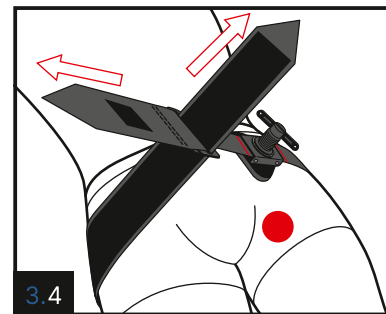


3.4  
Протягнути вільний кінець основного ременю через проріз пряжки. Потягнути вільний кінець основного ременю та ремінь першого туру в протилежні сторони.

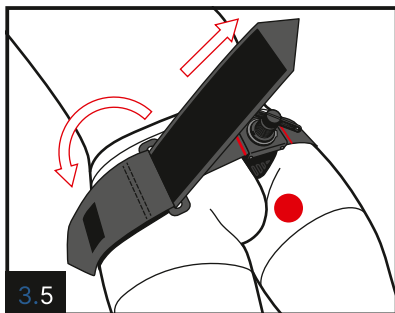


3.5  
Закріпити ремінь першого туру притиснувши його жорсткою частиною липучки до м'якої частини липучки.

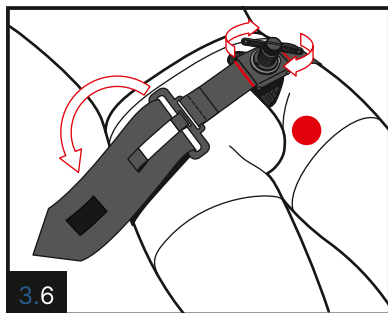

3.6  
Закрутити вороток механізму до зупинки кровотечі.

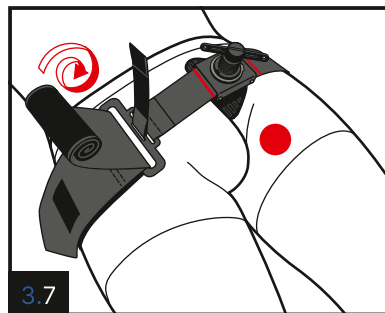

3.7  
Залишок ременю скрутити у рулон за годинникову стрілкою м'якою липучкою назовні.

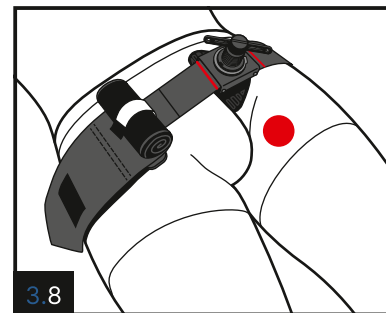

3.8  
Закріпити фіксатором залишку ременю сформований рулон та записати час накладання на відповідній білій бірці.

### 4. Умови зберігання

Виробник гарантує якість турнікета при належних умовах зберігання та використання, не допускаючи впливу на турнікет кислот, лугів, розчинників, відкритого вогню та інших речовин і процесів, які руйнують виріб. Зберігати в сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80% та температурі від мінус 20 градусів до плюс 40 градусів за Цельсьєм, уникати прямих сонячних променів.

### 5. Застереження

Увага! Вузловий турнікет "Шлях" - це пристрій для порятунку життя, тому при користуванні ним потрібно регулярно стежити за цілісністю всіх його конструктивних елементів та дотримуватися зазначених умов зберігання. Тривале накладання турнікета може призвести до незворотного неврологічного та м'язового пошкодження.

### 6. Відео інструкції використання



Направ камеру свого смартфона на QR-код









# ВУЗЛОВИЙ ТУРНИКЕТ


Модель: Gen 2.1.

LOT SHJT1/04.25

Умови використання


	Охоплення 68 - 140 см
MD	 -20°C + 40°C
	04/2025
	04/2030
	

ТУ У 21.2-44909475-002:2023

  
ТОВ "Шлях Система"  
04053, Україна, м. Київ,  
вул. Гоголівська, 39-а

+380 (97) 377 03 43

[www.shlyah.pro](http://www.shlyah.pro) | [info@shlyah.pro](mailto:info@shlyah.pro)

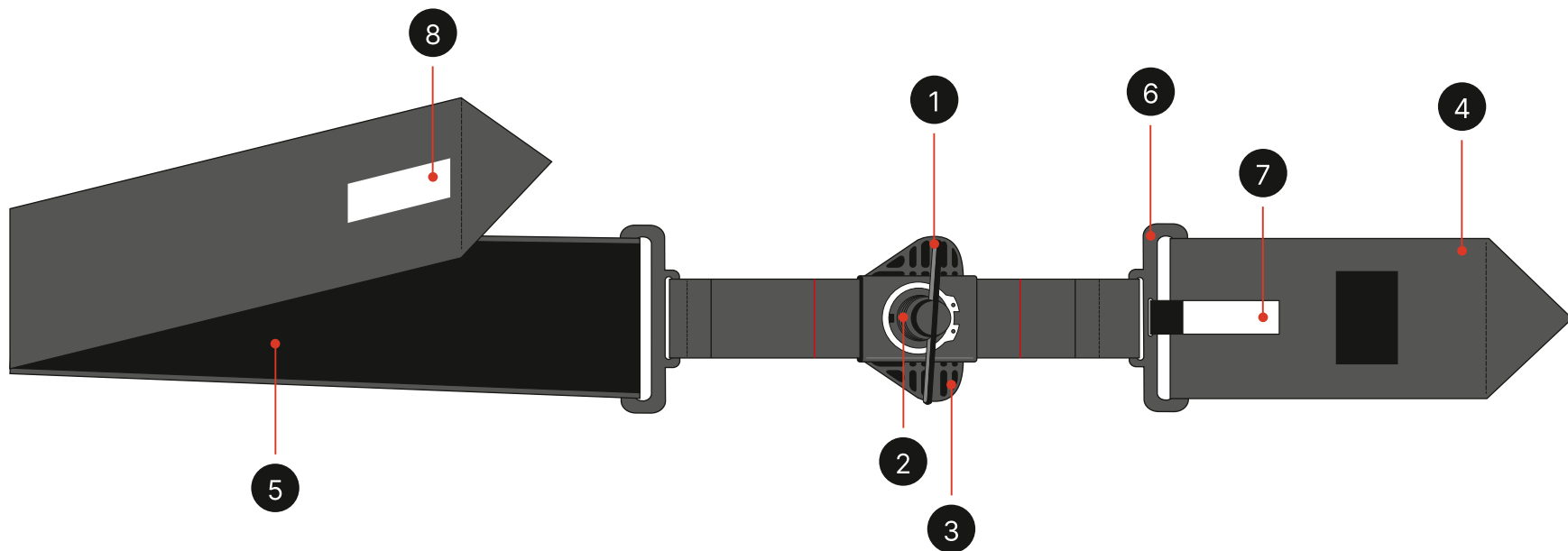

## 1. Призначення

Використовується для надання невідкладної домедичної допомоги, при кровотечах в паховій області, пошкодженні стегнової артерії або високих травматичних ампутаціях, у разі неможливості застосування стандартного турнікету.

## 2. Опис виробу

Вузловий турнікет "Шлях" складається з рухомої алюмінієвої платформи з гвинтовим механізмом, тиснучої подушки, пряжки та ременю. Обертання воротка гвинтового механізму створює рівномірний тиск по всій довжині ременю та в місці розташування тиснучої подушки.

- |   |                     |   |                            |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| 1 | Вороток             | 5 | Основний ремінь            |
| 2 | Механізм            | 6 | Пряжка                     |
| 3 | Тиснуча подушка     | 7 | Фіксатор залишку ременю    |
| 4 | Ремінь першого туру | 8 | Бірка розміщення турнікету |