




### 3. Інструкція з накладання

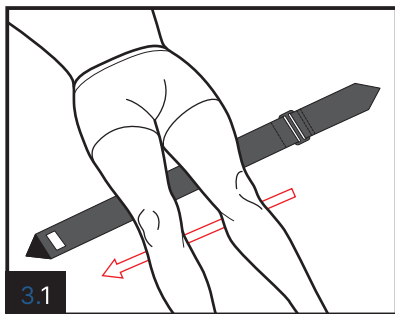


3.1 Протягнути під колінами кінець ременю з біркою розміщення шини до гори.

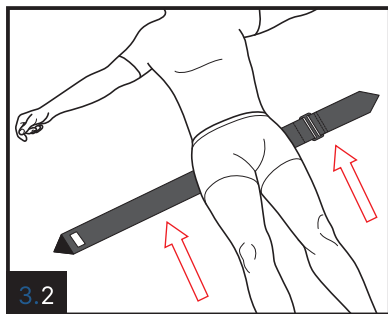


3.2 Ковзаючими рухами перемістити ремінь на рівень великих вертлюгів.

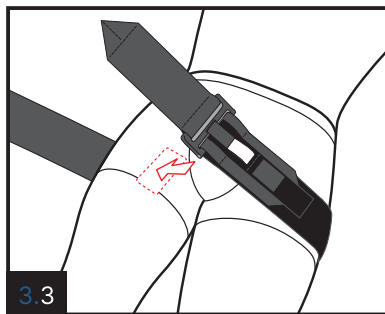


3.3 Розмістити пряжку тазової шини між лобковою кісткою та стегном.

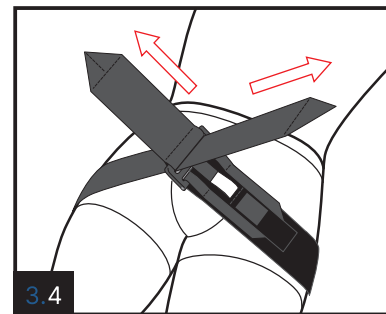


3.4 Протягнути вільний кінець ременю через проріз пряжки.

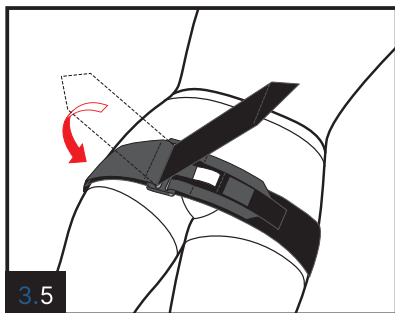


3.5 Залипучити фіксатор першого туру.

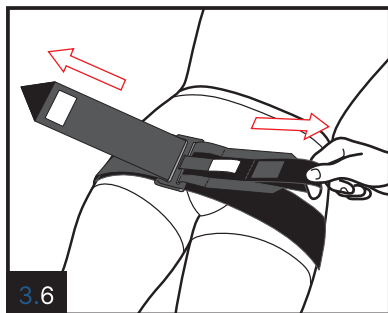

3.6 Потягнути вільний кінець ременю та петлю натягу в різні напрямки для створення тиску. Зберігаючи натяг притисніть петлю до поверхні тазової шини.

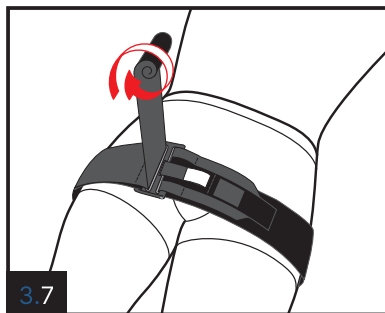

3.7 Залишок ременю скрутити у рулон за годинниковою стрілкою м'якою липучкою назовні.

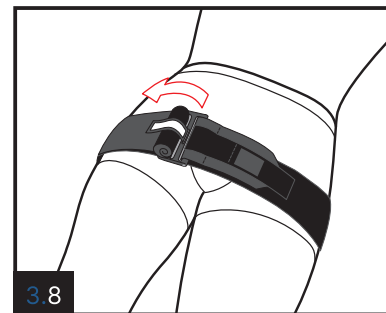

3.8 Залипучити біркою сформований рулон та записати час накладання.

### 4. Умови зберігання

Виробник гарантує якість тазової шини при належних умовах зберігання та використання, не допускаючи впливу на тазову шину кислот, лугів, розчинників, відкритого вогню та інших речовин і процесів, які руйнують виріб. Зберігати в сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 80% та температурі від мінус 20 градусів до плюс 40 градусів за Цельсієм, уникати прямих сонячних променів.

### 5. Застереження

Увага! Тазова шина "Шлях" - це пристрій для порятунку життя, тому при користуванні ним потрібно регулярно стежити за цілісністю всіх його конструктивних елементів та дотримуватися зазначених умов зберігання.

### 6. Відео інструкції використання



Направ камеру свого смартфона на QR-код



**ШЛЯХ**


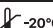







Живи собі назустріч!

## ТАЗОВА ШИНА


Модель: Gen 3.2

LOT SHPM1/04.25

Умови використання


 Охоплення 68-134 см
MD  -20°C + 40°C 
 04/2025  04/2030
   

ТУ У 21.2-44909475-003:2024

  
ТОВ "Шлях Система"  
04053, Україна, м. Київ,  
вул. Гоголівська, 39-а

+380 (97) 377 03 43

[www.shlyah.pro](http://www.shlyah.pro) | [info@shlyah.pro](mailto:info@shlyah.pro)

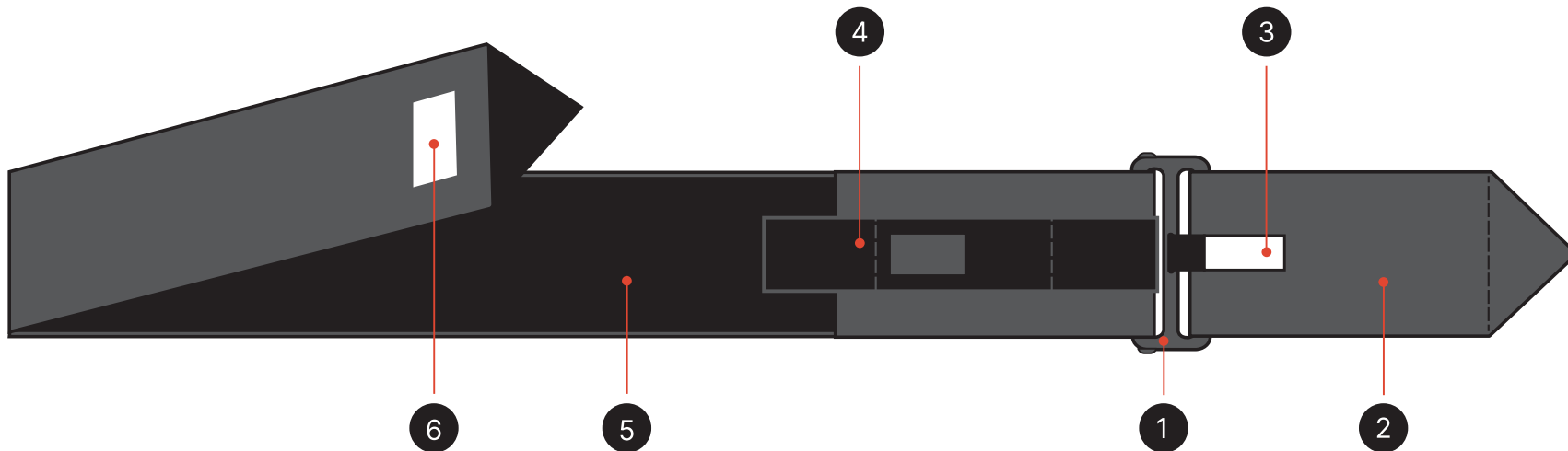

### 1. Призначення

Використовується для надання невідкладної домедичної допомоги при підозрі перелому кісток тазу, за наявності травм спричинених ударом тупим предметом, падінням з висоти, вибухом та іншим, при наявності однієї з ознак: біль в ділянці тазу, часткова або повна ампутація нижніх кінцівок, фізичні ознаки, що вказують на перелом кісток тазу.

### 2. Опис виробу

Тазова шина "Шлях" складається з реміню з фіксуючими елементами, пряжки, рухомого ролику та петлі натягу. Натяг відповідної петлі стягує ремінь по окружності тазу, створює тиск та іммобілізує його.

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 Пряжка                           | 4 Петля натягу          |
| 2 Фіксатор першого туру            | 5 Ремінь                |
| 3 Бірка зазначення часу накладання | 6 Бірка розміщення шини |